

Envío

- Las muestras que se enviarán el mismo día deben enfriarse y enviarse con bolsas de hielo
- Las muestras también pueden ser congeladas (a -20 °C) y enviadas a su conveniencia
- El formulario de envío y las instrucciones se pueden encontrar en <https://www.genics.com.au/porkmultipath/>

Las muestras deben enviarse a la siguiente dirección:

Genics Head Office
Level 5, 60 Research Road,
St Lucia, QLD, 4067 AUSTRALIA



Contáctenos

Si tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia, comuníquese con:

info@genics.com
www.genics.com

Genics Head Office
Level 5, 60 Research Road
St Lucia, QLD, 4067 AUSTRALIA



Genics: Guía de recolección
de muestras de calcetines



GENICS

genics.com

Hola

Bienvenido a la **Guía de recolección de muestreo de calcetines en Cerdos de Genics**. En esta guía encontrará una lista de todos los materiales necesarios para completar la recolección, incluidas instrucciones claras sobre el proceso.

Necesitará

- Cubre botas de plástico desechables
- Vendaje de algodón en forma tubo (ejm: vendaje tubular Tricofix Tamaño D) cortado en tubos
- Bolsas de plástico limpias
- Guantes desechables
- Marcador permanente



Pasos

- 1 Humedezca el vendaje del tubo con solución salina estéril o agua del grifo sin cloro (por ejemplo, agua potable para cerdos)
- 2 Tome muestras cada 3 corrales por establo como se muestra a continuación, y etiquete previamente las bolsas de muestras limpias según corresponda (ej., bolsa n.º 3, 6, 9, etc.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	17	16	15	14	13	12	11	10



Imagen 1) Cubra las botas para reducir la posibilidad de contaminación

- 3 Mientras se encuentra en el corral para tomar la muestra, póngase los guantes desechables y cubra sus dos botas con una cubierta de plástico desechable. Luego cubra la parte delantera de sus botas con el vendaje de tubo húmedo (ver imagen 1), como si fuera un calcetín.
- 4 Comience a caminar alrededor de la parte del corral con contaminantes fecales con pasos pequeños (10 cm)
- 5 Cada 4 o 6 pasos, gire los vendajes alrededor de una cuarta parte alrededor de las botas
- 6 Continúe caminando y rotando hasta que toda la tela haya quedado expuesta al piso del corral
- 7 Con guantes desechables, retire los vendajes de tubo de sus botas y colóquelos en la bolsa etiquetada correspondiente que luego se puede sellar
- 8 Para evitar la contaminación cruzada, cambie los guantes y cubre zapatos entre corrales
- 9 No agrupe muestras de calcetines de diferentes corrales

Instrucciones de envío al dorso

